

PROCEDURE DI APPLICAZIONE PERIORAL3

- Terapia parodontale non chirurgica gengiviti placca correlata

N1 applicazione di Perioral3 al termine della seduta, il paziente non deve risciacquare per 20 min

- Terapia parodontale non chirurgica parodontiti

N1 applicazione di Perioral3 al termine di ogni seduta, il paziente non deve risciacquare per 20 min. Si possono ripetere successive applicazioni di Perioral3 nelle tasche parodontali, anche senza strumentare, nelle settimane successive alle procedure professionali: le applicazioni vanno distanziate di 7 giorni l'una dall'altra per un numero relativo allo stato del sito, è una valutazione del clinico

- Terapia parodontale non chirurgica perimplantiti

N1 applicazione di Perioral3 al termine di ogni seduta, il paziente non deve risciacquare per 20 min. Si possono ripetere successive applicazioni di Perioral3 nei siti d'infrazione ossea, anche senza strumentare, nelle settimane successive alle procedure professionali: le applicazioni vanno distanziate di 7 giorni l'una dall'altra per un numero relativo allo stato del sito, è una valutazione del clinico

- Trattamenti di chirurgia implantare e parodontale

N1 applicazione di Perioral3 sul sito chirurgico prima di cominciare la procedura per decontaminare la superficie delle mucose, N1 applicazione al termine della procedura chirurgica per ridurre il rischio d'infezione del sito trattato. Il paziente non deve risciacquare per 20 min

- Trattamenti chirurgia estrattiva

N1 applicazione di Perioral3 a livello dell'alveolo, applicare una garzina per dare l'effetto tampone. Il paziente non deve rimuovere la garzina per 40 min; in caso di sutura, applicare Perioral3 lungo l'area di margine e sulle suture per decontaminare il sito chirurgico. Applicare garzina sterile per 40 min.

In caso di alveolite, si può utilizzare Perioral3 per decontaminare l'alveolo infetto, N3 applicazioni a distanza di 24 ore l'una dall'altra.